

Instrukcja ładowania akumulatora ActivoMed (NiMH 2000mAh)

⚠ WAŻNE!

Używaj wyłącznie dedykowanej ładowarki sieciowej 230V dołączonej do zestawu ActivoMed. Stosowanie innych ładowarek może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora, jednostki sterującej, a nawet stanowić zagrożenie pożarowe.

🔌 Przygotowanie do ładowania

1. **Odłącz akumulator** od jednostki sterującej.
2. Upewnij się, że **przełącznik znajduje się w pozycji OFF (oznaczenie „0”)**.
3. Umieść akumulator na stabilnej, niepalnej powierzchni – z dala od źródeł ciepła, wody oraz łatwopalnych materiałów.

🔌 Proces ładowania

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka 230V.
2. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda akumulatora.
3. Po podłączeniu, na ładowarce **zapali się czerwona dioda** – oznacza to, że trwa ładowanie.
4. Po zakończeniu procesu, **dioda zmieni kolor na zielony**, co oznacza pełne naładowanie.

🕒 Czas ładowania

- Zalecany czas ładowania: **8–12 godzin**.
- Najlepiej ładować **w nocy**, aby bateria była gotowa do pracy rano.

🔒 Środki ostrożności i bezpieczeństwo

- **Nie zostawiaj ładowanego akumulatora bez nadzoru przez długi czas.**
- **Trzymaj ładowarkę i akumulator z dala od dzieci i zwierząt.**

- Nie próbuj rozbierać, przerabiać ani naprawiać akumulatora ani ładowarki.
- Nie narażaj akumulatora na działanie wody, ekstremalnych temperatur, ognia ani uderzenia mechaniczne.
- W przypadku zauważenia **nietypowego zapachu, dymu lub przegrzewania się, natychmiast przerwij ładowanie** i odłącz ładowarkę z gniazda.

 Po zakończeniu ładowania

1. Odłącz ładowarkę od akumulatora.
2. Następnie wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
3. Przechowuj akumulator w suchym, chłodnym miejscu, gotowy do podłączenia do jednostki sterującej.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące ładowania sprzętu ActivoMed – skontaktuj się z zespołem Horse-Mag.

 +48 881 611 538

 kontakt@horsemag.pl

 www.horsemag.pl

