

## Instrukcja obsługi jednostki sterującej ActivoMed (Skrzynka wielofunkcyjna)

### Przygotowanie do uruchomienia

1. **Podłącz urządzenia terapeutyczne** (derkę, laser WLP lub ochraniacze) do odpowiednich gniazd w jednostce sterującej:
  - Jeśli korzystasz z rozdzielacza – użyj go zgodnie z oznaczeniami.
  - **Zwróć uwagę na orientację wtyczki** – każda wtyczka męska posiada **strzałkę**, a na obudowie gniazda znajduje się **kropka**. Oba oznaczenia muszą być **idealnie spasowane**.
  - **! Nigdy nie używaj siły** – niewłaściwe wpięcie może spowodować uszkodzenie pinów.
2. **Podłącz akumulator** (NiMH 2000mAh) do jednostki sterującej, upewniając się, że **przełącznik znajduje się w pozycji OFF (0)**.
3. **Włącz akumulator** – przesunij przełącznik do pozycji ON (1).

### Wskaźnik naładowania baterii

Na ekranie pojawi się napięcie akumulatora, które informuje o jego stanie naładowania:

- **12,8V ≈ 100%**
- **11,6V ≈ 0%**

### Obsługa przez klawiaturę dotykową SENSO

Klawiatura SENSO reaguje na **lekkie dotknięcie palcem** – nie należy jej naciskać z siłą.

 **Uwaga:** Klawiatura może **nie reagować prawidłowo na dotyk w rękawiczkach** – zaleca się obsługę gołą dłońią lub używanie rękawiczek przystosowanych do ekranów dotykowych.

### Uruchamianie programów

4. Dotknij przycisku [**Start/Stop**] – ekran wyświetli **P 01**. To pierwszy z **18 dostępnych programów terapeutycznych (P 01 – P 18)**.
5. Za pomocą przycisków [**Zählen/Count**] wybierz żądany program.
6. Aby przejść do trybu **sekwencji automatycznych**, dotknij przycisku [**Blättern/Page**]. Na ekranie pojawi się **S 01**. Dostępnych jest **8 sekwencji (S 01 – S 08)**.

7. Za pomocą przycisków [**Zählen/Count**] wybierz żądaną sekwencję.
8. Dotknij [**Start/Stop**], aby uruchomić wybrany program lub sekwencję.

---

#### **Informacje o czasie**

- Ekran wyświetla pozostały **czas trwania programu** (w minutach, a w ostatniej minucie – także w sekundach).
- W przypadku sekwencji pokazuje czas **aktualnego programu, nie całej sekwencji**.

---

#### **Tryb czuwania i zakończenie terapii**

8. Po zakończeniu programu ekran się **automatycznie wyłącza**.
9. Aby ponownie aktywować ekran, dotknij [**Start/Stop**].
10. Kolejne dotknięcie [**Start/Stop**] ponownie aktywuje ostatni program / sekwencję.
11. **W trybie uśpienia** ekran pokazuje **migającą kropkę** w prawym dolnym rogu.
12. Po zakończeniu terapii **wyłącz akumulator** – przesunij przełącznik do pozycji OFF (0).


---


#### **Zasady bezpieczeństwa i konserwacja**

- W razie konieczności rozłączania elementów:
  - **Lekko naciśnij wtyczkę w okolicach złącza, aby zwolnić blokadę.**
  - **! Nie ciągnij ani nie używaj siły** – może to doprowadzić do uszkodzenia gniazd.
- **Zabezpiecz nadmiar przewodów** – owiń je wokół jednostki sterującej i akumulatora, aby:
  - koń **nie zaplątał** się w kable,
  - nie zaczepił o elementy otoczenia.
- **Jeżeli korzystasz z ochraniaczy, pozostaw wystarczający luz na kablu.**

---

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące obsługi sprzętu ActivoMed – skontaktuj się z zespołem Horse-Mag.

 +48 881 611 538

 kontakt@horsemag.pl

 [www.horsemag.pl](http://www.horsemag.pl)

