

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA
dla ochraniaczy z masażem oraz lasera WLP
PROGRAMY

www.horsemag.pl
tel: +48 881 611 538
kontakt@horsemag.pl



Program	MAS / PMT / WLP	Czas (t)	Czest. (F)	Intens. (I)	Laser (L)	Masaż (d)	Wibracje (h)	Opis
P 01	PMT / MAS	15 min	12 Hz	10	OFF	8 sek	5	Pre Warmup masaż + pole magnetyczne
P 02	PMT / MAS	15 min	8 Hz	10	OFF	5 sek	5	Regeneracja po treningu
P 03	PMT / MAS	5 min	4 Hz	8	OFF	6 sek	4	Kończyny, ścięgno (słaby)
P 04	PMT	5 min	6 Hz	10	OFF	OFF	OFF	Kończyny, ścięgno (mocny)
P 05	PMT / MAS	20 min	8 Hz	10	OFF	6 sek	5	Relaksujący masaż + pole magnetyczne
P 06	WLP / PMT	20 min	4 Hz	4	3 OFF	OFF	OFF	Świeże (ostre) rany bezpośrednio po urazie
P 07	WLP / PMT	20 min	15 Hz	8	12 OFF	OFF	OFF	Ciężko gojące się, otwarte rany
P 08	WLP / PMT	20 min	8 Hz	8	6 OFF	OFF	OFF	Na początku procesów gojenia się ran
P 09	WLP / PMT	20 min	15 Hz	10	12 OFF	OFF	OFF	Gojenie ran w zaawansowanym stadium
P 10	WLP / PMT	20 min	6 Hz	10	2 OFF	OFF	OFF	Ostry stan zapalny mięśni
P 11	WLP / PMT	20 min	15 Hz	10	12 OFF	OFF	OFF	Przewlekłe stany zapalne mięśni
P 12	WLP / PMT	20 min	10 Hz	10	12 OFF	OFF	OFF	Stan zapalny mięśni, początek gojenia się włókien
P 13	WLP / PMT	20 min	8 Hz	10	6 OFF	OFF	OFF	Stan zapalny mięśni, zaawansowane stadium gojenia się włókien
P 14	WLP / PMT	20 min	12 Hz	8	12 OFF	OFF	OFF	Nagromadzenie płynów pod skórą
P 15	WLP / PMT	20 min	15 Hz	10	12 OFF	OFF	OFF	Nagromadzenie płynu w stawach
P 16	WLP / PMT	20 min	4 Hz	6	6 OFF	OFF	OFF	Ostry ból
P 17	WLP / PMT	20 min	8 Hz	10	10 OFF	OFF	OFF	Przewlekły ból
P 18	--	20 min	--	--	--	--	--	Program własny - NIE USTAWIONY

Dowiedz się więcej :

Magnetoterapia



<https://horsemag.pl/magnetoterapia/>

Laseroterapia



<https://horsemag.pl/laseroterapia/>

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA
dla ochraniaczy z masażem oraz lasera WLP
SEKWENCJE

www.horsemag.pl
[tel: +48 881 611 538](tel:+48881611538)
kontakt@horsemag.pl



Nr sekwencji	1	2	3	4	5	Opis
S 01	P 03	P 03	P 03	P 03	P 03	Kończy Standard (PMT + MAS)
S 02	P 03	P 04	P 03	P 04	P 03	Kończy Interwał (PMT + MAS)
S 03	P 10	P 13	P 10	--	--	Regeneracja / Profilaktyka (PMT)
S 04	P 13	P 05	P 10	--	--	Ogólny program relaksujący (PMT + MAS + PMT)
S 05	--	--	--	--	--	NIE USTAWIONY
S 06	--	--	--	--	--	NIE USTAWIONY
S 07	--	--	--	--	--	NIE USTAWIONY
S 08	--	--	--	--	--	NIE USTAWIONY

Dowiedz się więcej :

Magnetoterapia



<https://horsemag.pl/magnetoterapia/>

Laseroterapia



<https://horsemag.pl/laseroterapia/>