

Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń terapeutycznych dla koni

Dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swojego konia – i swoje! 🐾 ❤️

Poniżej znajdziesz najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z naszych urządzeń terapeutycznych: **lasera biostymulacyjnego**, **magnetoterapii (PEMF)** oraz **ultradźwięków**.

Laseroterapia

WLP ActivoMed oraz PhysioGo.Lite LASER + CL1800

- ♦ Nigdy nie patrz bezpośrednio w wiązkę lasera, nawet jeśli wydaje się słaba lub niewidoczna.
- ♦ Nie kieruj promienia w oczy – ludzkie, końskie ani innych zwierząt.
- ♦ Przestrzegaj limitów czasu naświetlania – stosuj się do zaleceń producenta, terapeuty lub lekarza weterynarii.

Nie stosuj lasera na:

- głowę,
 - okolice oczu,
 - narządy rozrodcze,
 - otwarte rany (chyba że zalecono inaczej),
 - miejsca z metalowymi implantami (bez konsultacji z lekarzem weterynarii)
- ♦ **Bez wyraźnego zalecenia lekarza weterynarii** nie stosuj u klaczy w ciąży ani u koni z nowotworami lub ostrymi stanami zapalnymi.

 Przed użyciem: sprawdź ustawienia, czas terapii oraz stan techniczny urządzenia.

 **Promieniowanie podczerwone (IR), np. 808 nm lub 950 nm, jest niewidoczne dla ludzkiego oka ale bardzo niebezpieczne!**

 **ZAWSZE** stosuj odpowiednie **okulary ochronne**, dostosowane do długości fali (635 nm, 660 nm, 808 nm, 950 nm). Okulary powinien mieć na sobie także każda osoba przebywająca w pobliżu, podczas pracy lasera.

Magnetoterapia – Derki i ochraniacze PEMF

 **Nie stosuj u koni ani w pobliżu osób z:**

- rozrusznikiem serca,
 - elektronicznymi implantami,
 - pompami insulinowymi.
- ♦ **Bez wyraźnego zalecenia lekarza weterynarii** nie stosuj u klaczy w ciąży oraz koni z nowotworami lub ostrymi stanami zapalnymi.
- ♦ Przed zabiegiem: usuń pot, maści i zabrudzenia z powierzchni skóry.
- ♦ Trzymaj urządzenia z dala od telefonów, zegarków i kart płatniczych – magnesy mogą zakłócać ich działanie.
- ♦ **Nie zakładaj derki ani ochraniaczy, jeśli koń ma otwarte rany lub problemy skórne** (np. grzybica, łupież, gruda).
-  Przed użyciem: sprawdź ustawienia, czas terapii oraz stan techniczny urządzenia.

Ultradźwięki – Aparat PHYSIOGO 201A

 **Nie przykładaj głowicy do:**

- głowy i oczu konia,
 - narządów rozrodczych,
 - okolic serca,
 - miejsc z otwartymi ranami lub ostrym stanem zapalnym.
- ♦ **Bez wyraźnego zalecenia lekarza weterynarii** nie stosuj u klaczy w ciąży oraz koni z nowotworami lub ostrymi stanami zapalnymi.
- ♦ Podczas zabiegu: głowicę prowadź powoli – **nie zatrzymuj jej w jednym miejscu.**
- ♦ **Używaj żelu przewodzącego** lub innego „transmitera” dla fal (np. maść z lekiem).
- ♦ W przypadku młodych koni w fazie wzrostu (do około 6 roku życia) – **skonsultuj się z weterynarzem.**

 Przed użyciem: sprawdź ustawienia, czas terapii oraz stan techniczny urządzenia.

 Głowicę należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką (**NIE** ręcznikami papierowymi) i preparatem na bazie alkoholu etylowego do 70%.

Na zakończenie...

 Stosując się do powyższych zasad:

- zapewnisz bezpieczeństwo sobie i koniowi,
- zwiększysz skuteczność terapii,
- unikniesz niepotrzebnych ryzyk.

W razie wątpliwości – zawsze skontaktuj się z nami lub z lekarzem weterynarii.

 **kontakt@horsemag.pl** |  **+48 881 611 538**

